




La demande d'analyses – étape par étape

Important:

- formulaire jaune pour petits animaux et animaux de compagnie
- formulaire vert uniquement pour la microbiologie/parasitologie
- formulaire gris uniquement pour les analyses génétiques
- formulaire bleu uniquement pour les examens pour les chevaux et les animaux de rente

Remplir le formulaire


- 1 Collez l'**étiquette de demande** du jeu d'étiquettes dans le champ situé dans le coin supérieur droit du formulaire de demande.
- 2 Marquez au stylo à bille bleu, comme sur l'illustration ci-contre, les analyses souhaitées ainsi que les indications concernant **l'espèce animale, le sexe, le matériel, le cas échéant la voie d'accès aux résultats et la facturation**.
 - Si un test a été marqué par erreur, barrez le nom du test, y compris la case cochée.
- 3 Veuillez compléter à la main les autres informations concernant **le nom du propriétaire de l'animal, la race, le nom de l'animal, l'âge, le numéro d'identification** et, le cas échéant, les remarques.
- 4 Lors de **la facturation au propriétaire de l'animal**, cochez la case correspondante dans le champ Facturation, indiquez l'adresse actuelle du propriétaire de l'animal et faites signer le propriétaire de l'animal en signe d'accord.
 - Si l'adresse du propriétaire de l'animal et/ou la signature font défaut, la facturation sera automatiquement adressée au cabinet.

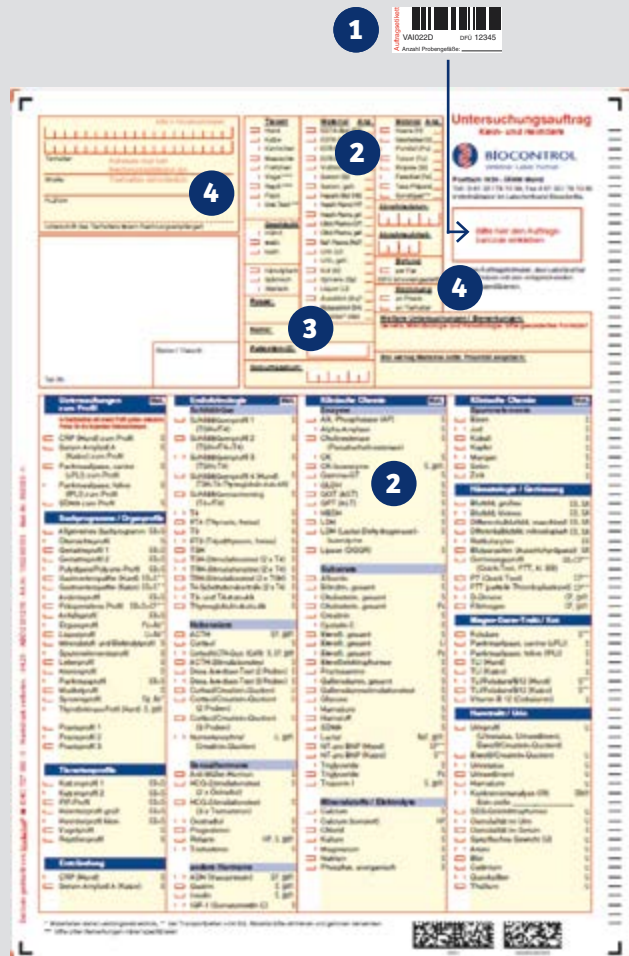

Les échantillons avec les codes-barres

Important! Veuillez n'utiliser que les codes-barres d'une seule feuille d'étiquettes par demande. Joignez le reste des codes-barres à la demande.

- 5 Collez le code-barres correspondant à l'échantillon sur les tubes d'échantillons à la hauteur de l'étiquette existante, dans le sens de la longueur, la flèche rouge pointant vers le bouchon.
 - Collez sur les prélèvements supplémentaires (par ex. sérum 2 pour les tests fonctionnels) un code-barres sans désignation du matériel et inscrivez la désignation du matériel sur l'étiquette.

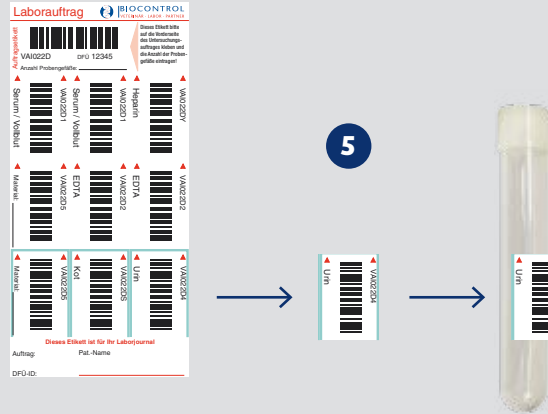

Emballage / Expédition

- Veuillez plier une fois le formulaire de commande rempli au format A5.
- 6 Placez tout le **matériel d'analyses** (tubes, lames porte-objets, frottis, etc.) dans des **recipients de protection appropriés**, conformément aux directives d'emballage de la Deutsche Post AG (GGVS - voir cahier des charges). Ensuite, insérez le **formulaire de demande** dans nos **pochettes d'expédition spéciales** et envoyez-les.



Journal de Laboratoire

- 7 Le jeu de codes-barres contient une étiquette à coller dans votre journal de laboratoire. Il contient le numéro de demande, qui vous permet également de consulter les résultats par voie électronique, ainsi qu'un champ pour inscrire le nom du propriétaire de l'animal.

